



Information  
du patient

Traitement parodontal non chirurgical

Dites adieu à la  
maladie des gencives

leading regeneration

**Geistlich**

## Comprendre la maladie des gencives : points clés

### Pourquoi est-il important d'avoir des gencives saines ?

La maladie parodontale, également appelée maladie des gencives, est une infection bactérienne chronique qui peut détruire les tissus buccaux durs et mous. Elle est très fréquente mais passe souvent inaperçue.

### Prévenez les complications

Sans traitement, la maladie des gencives peut conduire à la perte de dents. Cependant, un traitement précoce associé à des contrôles réguliers peut éviter des interventions importantes, comme la chirurgie.

### Facteurs de risque

Le tabagisme, une hygiène bucco-dentaire insuffisante, une mauvaise alimentation, le diabète et l'âge peuvent avoir un impact néfaste sur la santé des gencives. Adopter des mesures proactives peut significativement améliorer la situation.



#### Des dents et des gencives saines

Sourire éclatant : des gencives et des dents en parfaite harmonie.



#### Signes précoces d'une maladie des gencives (gingivite)

Premier avertissement : une inflammation et un saignement indiquent le début d'une maladie des gencives.



#### Maladie des gencives avancée (parodontite)

Stade critique : lésion grave des gencives et structure osseuse touchée.

## Symptômes


### Vous a-t-on diagnostiqué une maladie des gencives ?

#### Ressentez-vous l'un des symptômes suivants ?

- Des gencives rouges ou enflées
- Une douleur ou un saignement lors du brossage ou de l'utilisation du fil dentaire
- Une gêne lors de la mastication
- Un goût désagréable persistant dans la bouche

**Si oui, Pocket-X® Gel peut vous aider à retrouver une santé gingivale optimale.**

### Pocket-X® Gel

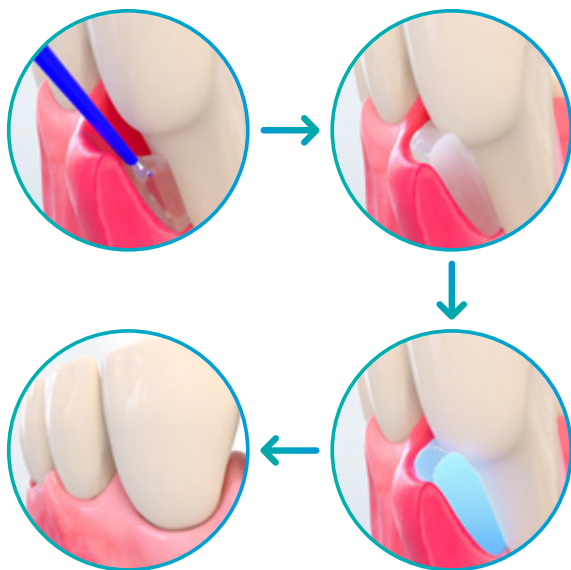

#### Résultats

- Les gencives entourent les dents et empêchent les bactéries d'entrer
- Moins d'inflammation
- Moins de saignement.

## Comment Pocket-X® Gel peut-il vous aider ?

Pocket-X® Gel a été développé spécifiquement pour faciliter le traitement de la maladie des gencives. Il s'applique après le nettoyage des poches gingivales parodontales. L'association unique des ingrédients de Pocket-X® Gel, tels que l'acide hyaluronique, favorise la cicatrisation de vos gencives et prévient les nouvelles inflammations<sup>1</sup>.

### Bénéfices de Pocket-X® Gel

#### 1. Application douce et non invasive

Facile et confortable, même dans les zones difficiles d'accès.

#### 2. Praticité au quotidien

Le traitement s'intègre aisément dans vos consultations dentaires régulières, sans perte de temps supplémentaire.

#### 3. Protection optimale

Formation d'une barrière pour empêcher l'entrée des bactéries, favorisant ainsi la cicatrisation.

#### 4. Moins d'inflammations pour des gencives plus saines

Amélioration significative de la santé des gencives observée 6 mois après le traitement avec Pocket-X® Gel<sup>2</sup>.

#### 5. Une expérience agréable

Aucune sensation désagréable, juste des soins efficaces.

### Références

<sup>1</sup> Prudentix Ltd., Israel, IFU 2023

<sup>2</sup> Hirsch et al.: Clinical oral investigations vol. 26,4 (2022): 3721-3733

**Pocket-X® Gel est un dispositif médical de classe II breveté (UE) fabriqué avec les ingrédients suivants :**

Acide hyaluronique, poloxamère 407, octénidine et phénoxyéthanol. Il est appliqué par votre dentiste pour favoriser la phase de cicatrisation après votre consultation.

## Favoriser la cicatrisation

Pocket-X® Gel a été appliqué à la fin de votre traitement. Pour maximiser ses bienfaits, veuillez suivre ces consignes de soins postopératoires :



**Ne mangez pas, ne vous rincez pas la bouche et ne pratiquez pas de gargarisme au cours des 2 heures qui suivent le traitement.**



**Ne consommez pas de boisson chaude au cours des 4 heures qui suivent le traitement.**



**Brossez-vous les dents très délicatement au cours des 2 jours qui suivent le traitement.**



**N'utilisez pas d'accessoires de nettoyage interdentaire (tels que le fil dentaire ou les brossettes) au cours des 2 jours qui suivent le traitement.**



### **Pratiques à suivre**

- Conservez une bonne hygiène bucco-dentaire.
- Suivez les recommandations de votre praticien.
- Prenez des rendez-vous de suivi.



### **Remarques**

- Les informations communiquées dans ce dépliant ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils médicaux de votre médecin traitant.
- Suivez les instructions spécifiques de votre médecin et dentiste.

**Fabricant**

Tree of Life Pharma Ltd.  
POB 799  
Lod 7110604 Israël

**Fabriqué exclusivement pour**

Prudentix Ltd.  
POB 799  
Lod 7110604 Israël

**Partenaire de distribution**

Geistlich Pharma AG  
Bahnhofstrasse 40  
6110 Wolhusen  
Suisse  
[www.geistlich-pharma.com](http://www.geistlich-pharma.com)

**Filiale en France**

Geistlich pharma France  
Parc des reflets  
165 avenue du Bois de la Pie  
95700 ROISSY EN FRANCE

Plus d'informations sur nos  
partenaires de distribution :  
[www.geistlich.com/fr-fr](http://www.geistlich.com/fr-fr)

