

Geistlich
Mucograft® Seal

Geistlich
Bio-Oss® Collagen

Minima invasività,
massimo risultato per i tessuti molli



Linee guida tecniche

per l'utilizzo di Geistlich Mucograft® Seal
negli alveoli estrattivi



Linee guida tecniche per l'utilizzo di Geistlich Mucograft® Seal e Geistlich Bio-Oss® Collagen nelle procedure di preservazione della cresta in alveoli estrattivi

Geistlich Mucograft® Seal è un'alternativa agli innesti di tessuto molle autologo ed è raccomandata negli alveoli post-estrattivi per la «preservazione della cresta» in combinazione con Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Sulla base di un'esperienza clinica di oltre cinque anni con Geistlich Mucograft® e sul Consensus del meeting dell'Advisory Board su Geistlich Mucograft® Seal (2013), le linee guida tecniche per Geistlich Mucograft® Seal utilizzata con Geistlich Bio-Oss® Collagen sono:

- > Utilizzare Geistlich Mucograft® Seal con Geistlich Bio-Oss® Collagen dopo estrazione atraumatica del dente quando le pareti vestibolari dell'alveolo sono preservate. La definizione di alveolo post-estrattivo preservato è variabile e può includere difetti della parete ossea vestibolare compresi tra 0 e 50%.
- > Geistlich Mucograft® Seal deve essere utilizzata insieme ad un materiale per il riempimento degli alveoli (p.es. Geistlich Bio-Oss® Collagen).
- > Geistlich Mucograft® Seal non richiede pre-idratazione o lavaggio. Deve essere applicata asciutta.
- > Prima di applicare Geistlich Mucograft® Seal, i margini dei tessuti molli adiacenti dovrebbero essere disepitelizzati. Ciò permette alle cellule epiteliali di migrare liberamente dai tessuti molli all'interno della matrice.
- > Porre attenzione all'orientamento di Geistlich Mucograft® Seal: la struttura compatta della matrice dovrebbe essere rivolta verso l'esterno e la struttura spugnosa verso l'alveolo post-estrattivo. La struttura spugnosa di Geistlich Mucograft® Seal è striata per distinguere più facilmente i due lati.
- > Geistlich Mucograft® Seal deve essere suturata con filo non riassorbibile e non deve essere incollata. Lo stretto adattamento del dispositivo ai bordi del tessuto può essere realizzato con punti di sutura singoli interrotti, doppi interrotti o incrociati.
- > Il filo per la sutura dovrebbe essere il più sottile possibile: per punti di sutura singoli interrotti si consiglia un filo da 6.0 o 5.0; per suture incrociate un filo da 5.0.
- > Quando si sutura Geistlich Mucograft® Seal, accertarsi che lo stretto adattamento dei bordi del dispositivo ai bordi del tessuto molle marginale disepitelizzato dell'alveolo post-estrattivo sia privo di tensioni.
- > Un restauro provvisorio, rimovibile o fisso, non deve premere sull'innesto o causare lesioni dei tessuti.
- > E' possibile usare Geistlich Mucograft® Seal sia con biotipi gengivali spessi che sottili.
- > I criteri di selezione del paziente, l'assenza di infezioni nel sito e la compliance del paziente sono fattori importanti che contribuiscono al successo terapeutico.



Aprire il blister contenente Geistlich Mucograft® Seal con cautela. L'apertura rapida o incontrollata della confezione può causare la caduta del dispositivo.