

Shield for Success

Geistlich Bio-Oss Collagen®은
필요한 곳에 뼈의 양을 유지하는 보호막을 만들어
치료의 성공을 보장합니다.

- 협측 골 결손
- 수직적 작은 골 증대
- 임플란트 주변의 Gap Filling



50mg

A NEW SIZE
OF THE ORIGINAL
Geistlich Bio-Oss®
with 10% Collagen

작은 혁신이
큰 차이를 만들 수 있습니다.

EXACTLY

EXACTLY
 like no other.

Geistlich Bio-Oss Collagen® 50mg을 이용한 즉시 임플란트 식립






“Geistlich Bio-Oss Collagen® 50mg은
임플란트와 치조골 사이 공간을 채우는데 이상적인 크기입니다.
안정적인 골유착과 치유과정으로 경조직과 연조직의 부피를 유지하는데 도움을 줍니다.”

Dr. Justin Kang | New Jersey, USA

Objective: 골절된 상악 치아의 교체를 위해 발치 후 골 이식과
임플란트 식립.

Conclusion: Geistlich Bio-Oss® Collagen과
Geistlich Mucograft®는 절개 없이 예측 가능한 즉시 임플란트
식립을 위하여 필수적인 치료 재료입니다.

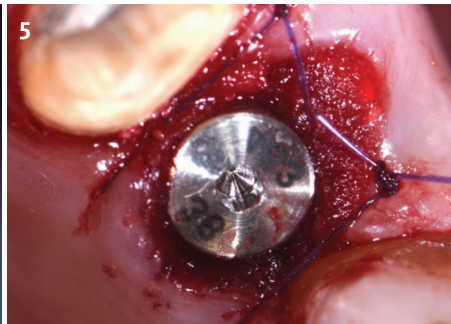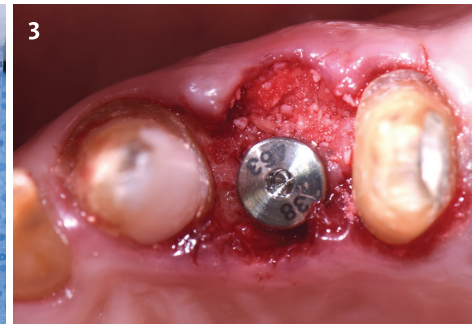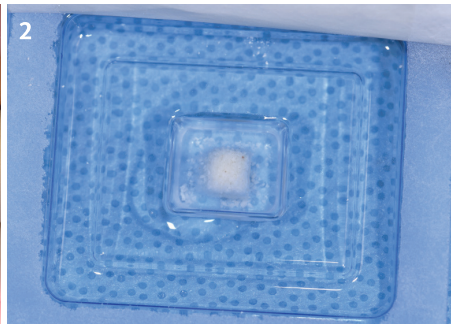

1 수술 전 진단 모습. 12번 치아를 발치하고 즉시
임플란트를 식립합니다.


2 Geistlich Bio-Oss® Collagen 50mg을
식염수에 수화시킵니다.

3 Geistlich Bio-Oss® Collagen 50mg을
임플란트 주변에 Gap filling 용도로 채웁니다.

4 Geistlich Mucograft® Seal을
Gap filling 부위의 치유를 위해 위치시키고
힐링 어버트먼트를 그 위에 체결합니다.

5 Geistlich Mucograft® Seal을 봉합합니다.

6 수술 4개월 후 임상. 골의 부피가 유지되고
각화 조직의 너비가 증가했습니다.

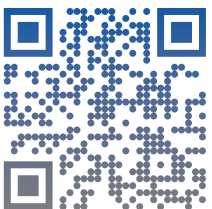

보다 더 자세한 정보를 원하신다면
Geistlich Bio-Oss® Collagen 페이지를 방문하시기 바랍니다.

사용시 주의사항 및 사용 지침에 대한 자세한 내용은
다음 사이트에서 Geistlich Biomaterials Instruction for Use를 참조하십시오.

