

제품 설명서 *본 제품은 의료기기임, 일회용 멸균의료기기(재사용 금지)

모델명: Safescraper TWIST Curve **품목명:** 수동식의료용골 수입품목신고번호: 서울 수신 06-675호

포장단위: 1 pcs per Pkg **제조원:** Meta Technologies S.r.l.

수입자: (주) 가이스트리히코리아 / 서울특별시 서초구 강남대로 51길 1 (서초동) 5층

사용목적: 자연 치아 상실로 인해 인공치아로 대체하려 할 때, 수복 부위의 잔존 치조골의 일부 결손 및 파절을 보완하여 주기 위해 환자 악골의 다른 곳의 풍부한 뼈를 일부 채취(Scraping)할 때 쓰이는 의료용 끌이다.

사용방법: 1) 골을 채취할 표면에 기구의 끝을 대고 눌러 주며 동시에 기구를 뒤쪽으로 당겨 골을 모은다. 골은 또한 비스듬하게나 옆으로 움직여 채취할 수 있다. 기구의 각도와 누르는 힘을 조절하여 의도했던 적절한 bone lamellae나 plates를 얻을 수 있다. 2) 모아진 골을 빼내기 위해, 투명 탱크 부위를 아래로 향하게 하여 잡은 다음 완전하게 열릴 때까지 날의 핸들을 뒤로 향해 이동시킨다. 3) 기구에서 Bone lamellae나 plates를 이식될 위치로 이동시키기 위해, 어떤 종류의 집게나 스포를 사용할 수 있다.

사용시 주의사항: 사용하기 전에 포장에 손상이었는지 확인할 것. 이 기구는 오로지 자격이 있는 외과 staff에 의해 사용되어야 한다. 이 기구를 사용할 때는 멸균 장갑을 착용하고 날의 날카로운 가장자리가 그 장갑을 뚫 수 있으니 유의 할 것. 외과의는 환자가 골 이식에 적합한지 확인하고 감염의 위험을 방지하기 위하여 모든 골 이식 절차에 관련된 합병증과 필요한 예방 조치를 취 해야 한다. (작성년월: 2024년 1월)

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기안전정보원, 대표전화: 1588-4183)

Geistlich